



150 kg



## Aúpa Chair

Silla-grúa de transferencia eléctrica

**FICHA TÉCNICA**

más de 50 años viviendo sin límites

### ⚠ Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.



**PROSER**  
CLINIC

# MINI aúpa! chair

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

150 kg



### Arneses

Ancho útil para sentarse (talla)	45 cm
Arnés básico (de serie)	46 x 42 cm
Arnés inodoro (accesorio)	46 x 42 cm
Arnés rígido (accesorio)	50 x 45 cm
Arnés rígido inodoro (accesorio)	50 x 45 cm
Base rígida (accesorio)	50 x 45 cm

Para más información sobre los arneses, visite la siguiente página

### Motor

Motor	24V · 6000 N
Batería	5 Ah
Número de usos por carga	80 - 100 veces

### Patas

Ancho entre patas (medida exterior)	54,5 cm
Ancho entre patas (medida interior, apertura)	42 cm
Largo de patas	57 cm
Alto de patas	11,5 cm

### Reposabrazos

Largo del reposabrazos	35 cm
Ancho del reposabrazos	5 cm
Ancho entre reposabrazos	45 cm
Tipo de reposabrazos	Extraíbles (quick release)

### Respaldo

Ancho del respaldo	52 cm
Alto del respaldo	27 cm
Tipo de respaldo	Extraíble

### Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 8 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 10 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm
Ancho ruedas traseras	4 cm
Tipo de ruedas	Macizas

### Otras características

Control de piernas	Sí, extraíbles y regulables en inclinación
Cubeta	Sí (accesorio)
Funda protectora	Sí (de serie)
Plegable	Sí, con quick release
Tipo de freno	Freno bloqueo
Resistente al agua	Sí



Es fundamental que tenga precaución y evite colocar su silla-grúa Aupa Chair en contacto directo con el agua, ya que esta acción podría ocasionar daños irreparables.



## SILLA-GRÚA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA MULTIFUNCIONAL

La silla Aúpa Chair representa una solución innovadora para hacer transferencias y traslados. Con un diseño intuitivo, permite a los cuidadores desplazar al usuario de manera segura y eficiente, incluso en espacios reducidos donde el uso de una grúa convencional puede resultar complicado. Además, su sistema de plegado sencillo la hace extremadamente práctica.

Se puede utilizar como silla de ducha e inodoro gracias a su cubeta equipada con arneses adaptados. Su fabricación en acero al carbono la hace resistente al agua, mientras que su funda protectora preserva la integridad de la electrónica.

## INFORMACIÓN GENERAL

### Medidas

Ancho total	55 cm
Apertura total*	42 cm
Profundidad total	80 cm
Alto total (regulable)	83 - 109 cm

\*Distancia entre los interiores de las patas delanteras

### Elevación eléctrica · 26 cm

Altura total (regulable)	83 - 109 cm
Altura del arnés al suelo (al máx.)	56 - 82 cm
Altura del arnés al suelo (al mín.)	40 - 66 cm
Altura del reposabrazos al suelo	70 - 96 cm

### Medidas plegada




Ancho plegada	55 cm
Profundidad plegada	31 cm
Alto plegada	83 cm

### Peso

Peso total	32,6 kg
Peso máximo soportado	150 kg

Material Acero al carbono

Color Gris mate

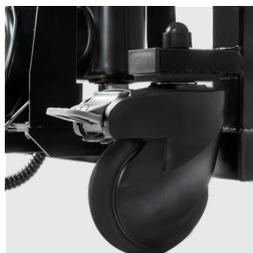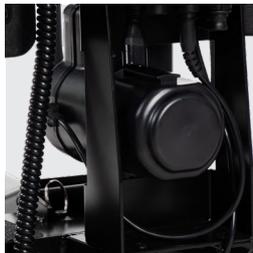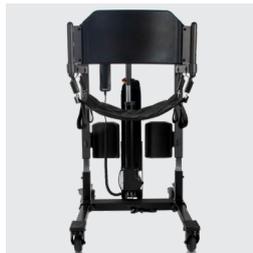



## SILLA-GRÚA DE ELEVACIÓN **MULTIFUNCIONAL**


La Aúpa Chair es muy versátil, permitiendo un uso sencillo y rápido.

Facilita transferencias desde el sofá, cama, silla de ruedas, coche y cualquier otro lugar que necesite.



### TRANSFERENCIA DESDE EL SOFÁ O SILLÓN

Realizar transferencias es sencillo y rápido, ya sea desde el sofá o un sillón en su hogar. Simplemente deslice las patas de la grúa por debajo de las del sofá, cuya altura mínima debe ser de **11,5 cm**.

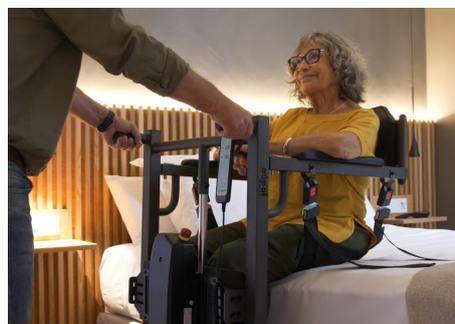

### TRANSFERENCIA DESDE LA CAMA

Con la Aúpa Chair, también es posible realizar transferencias directamente desde la cama. Este método es de los más sencillos: simplemente deslice las patas de la grúa por debajo de las de la cama y aplique la transferencia.



### TRANSFERENCIA DESDE LA SILLA DE RUEDAS

También permite realizar transferencias a sillas de ruedas, abata los reposabrazos y posiciónela.

**La compatibilidad puede depender del diseño y medidas de cada modelo de silla. Recomendamos revisar las especificaciones o probar con su silla directamente.**



### ACCESO AL COCHE

Con la Aúpa Chair, subir al coche es ahora más sencillo. Posiciónela frente a su vehículo y traslade al usuario.

**La compatibilidad puede depender del diseño y medidas de cada modelo de coche. Recomendamos revisar las especificaciones o probar con su coche directamente.**



### ACCESO AL BAÑO O WC

Gracias a la separación entre las patas, puede ingresar al baño y acercarse a su inodoro. Utilice el arnés con la apertura central para que el usuario pueda emplear la Aúpa Chair como silla inodoro. Además, cuenta con una cubeta de accesorio.



### ACCESO A LA DUCHA

Ingrese fácilmente a la ducha o a cualquier zona húmeda de su baño para garantizar una higiene personal óptima para el usuario. El chasis de la Aúpa Chair es resistente al agua.


**Consulte más información en la página 5.**



## SEGURIDAD Y COMODIDAD


Cuenta con un arnés de cuatro puntos de anclaje que se pueden regular en altura y ofrece estabilidad y seguridad al usuario durante el traslado.

Peso máximo soportado: **150 kg.**

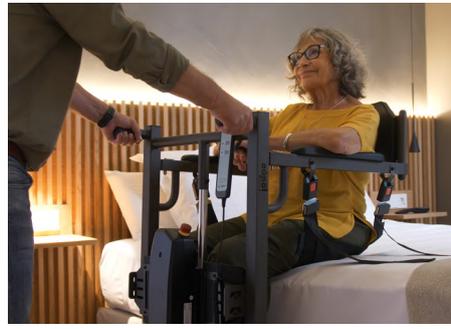

## ELEVACIÓN ELÉCTRICA

El pistón eléctrico permite subir y bajar el asiento de manera fácil y cómoda mediante un mando. Este sistema de elevación asegura un traslado suave y eficiente, minimizando el esfuerzo del cuidador y proporcionando una mayor comodidad al usuario.

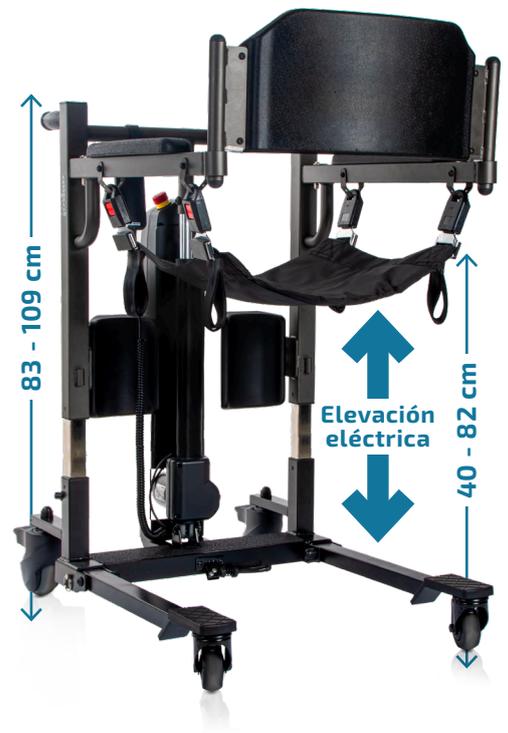

## ACCESORIOS Y ARNESES

COMPLETE SU AÚPA CHAIR CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS Y ARNESES



### Arnés básico

Ref: RCAUPACHAIR-02

Incluido de serie



### Arnés inodoro

Ref: RCAUPACHAIR-01

Accesorio



### Arnés rígido

Ref: RCAUPACHAIR-04

Accesorio



### Arnés inodoro rígido

Ref: RCAUPACHAIR-03

Accesorio



### Base rígida

Ref: RCAUPACHAIR-05

Accesorio



### Funda protectora

Ref: RCAUPACHAIR-09

Incluido de serie



### Soporte para cubeta

Ref: RCAUPACHAIR-07

Accesorio



### Cubeta

Ref: RCAUPACHAIR-08

Accesorio

## SILLA CON PLEGADO RÁPIDO · QUICK RELEASE

La Aupa Chair se pliega de manera compacta, sencilla y ágil. Puede transportarla en el maletero de su vehículo o almacenarla en un pequeño espacio en su hogar.

Soporte de pie





# RESISTENTE AL AGUA SILLA DE DUCHA E INODORO

**Aúpa Chair:** la innovadora silla de transferencia que amplía la familia de grúas Aúpa de IM by TotalCare, ofreciendo la solución más rápida y fácil para cuidadores de personas con movilidad reducida.

FABRICADA  
EN **ACERO**  
AL **CARBONO**



## SILLA DE DUCHA E INODORO

La Aúpa Chair no es solo una silla de transferencia, sino también una solución integral para el uso de baño e inodoro. Con una cubeta y un arnés especial con un agujero de serie, la silla Aúpa Chair se convierte en una silla inodoro completa.

Además, gracias a su material resistente al agua, se puede utilizar para el aseo diario. Incluye una funda protectora de serie para evitar que la caja electrónica se moje.

Es la solución completa para el cuidado de las personas con movilidad reducida.



**Es fundamental que tenga precaución y evite colocar su silla-grúa Aupa Chair en contacto directo con el agua, ya que esta acción podría ocasionar daños irreparables.**